

تعليمات الاستخدام

اسم الجهاز / اسم الطراز	القوة البصرية	B.C	DIA	السماكة
عدسة لاصقة لينة معقمة للاستخدام اليومي، قابلة لإعادة الاستخدام.	+20.00 D ~ -20.00 D	8.3~9.0 mm	14.0 ~ 15.0 mm	0.07 ~ 0.34 mm

يرجى الرجوع إلى ملصق العبوة للحصول على مواصفات المنتج المحددة.

المحتويات: عدسات لاصقة لينة للاستخدام اليومي مغمورة في محلول ملحي متعادل التوتر

دواعي الاستعمال: قصر النظر، طول النظر

الاستخدام المقصود:

العدسات التصحيحية مخصصة للاستخدام اليومي لتصحيح الرؤية في حالات قصر النظر وطول النظر لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض في العين.

فئة المرضى المستهدفة: أي مرضى يحتاجون إلى تصحيح البصر. تتراوح الأعمار بين 10 إلى 70 سنة. لا يرتبط الاستخدام بالجنس أو الوزن أو العرق.

جدول الاستبدال: يرجى الرجوع إلى ملصق العبوة

المستخدم المقصود: شخص عادي (أفراد عاديون يحتاجون إلى تصحيح الرؤية)

بيئة الاستخدام المقصودة: الجهاز عبارة عن عدسة لاصقة لينة مخصصة للارتداء على قرنية العين البشرية لتصحيح الرؤية. يتم إجراء التركيب الأولي وتقديم التعليمات بواسطة أخصائي رعاية العيون في بيئة سريرية؛ بينما يتم إدخال العدسات وإزالتها وتنظيفها وتخزينها والتخلص منها بشكل روتيني بواسطة المستخدم في بيئات غير سريرية (مثل المنزل أو مكان العمل أو المدرسة) تحت ظروف بيئية عادية (درجة حرارة الغرفة، والإضاءة والرطوبة الداخلية/الخارجية المعتادة). يجب على المستخدمين اتباع تعليمات الخاصة بالمنتج والمقمنة من قبل الشركة المصنعة (IFU) الاستخدام.

تنبيهات

1. يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير يتعلق بالجهاز إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة

الاحتياطات

- 1) اتبع تعليمات أخصائيي رعاية العيون بشأن مدة استخدام العدسات اللاصقة يوميًا، وزيارات المتابعة، وإجراءات الطوارئ.
- 2) يجب إزالة العدسات اللاصقة فورًا بعد التعرض للأبخرة الضارة (مثل المواد الكيميائية أو المواد الخطرة) أو البيئات الخطرة التي قد تؤثر على العين.
- 3) إن التعرض المباشر للعدسات اللاصقة للمياه غير المعقمة (مثل ماء الصنبور، أو أحواض المياه الدوامية، أو السباحة، أو ممارسة الرياضات المائية) يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الميكروبية.
- 4) إن استخدام المياه غير المعقمة (مثل ماء الصنبور) أثناء التعامل مع العدسات اللاصقة أو حاويات العدسات يزيد من خطر الإصابة بعدوى ميكروبية خطيرة.
- 5) لا تقم بتغيير نوع العدسات أو مواصفاتها دون استشارة أخصائيي رعاية العيون.
- 6) تالفة أو إذا كان الحتم مكسورًا (Blistar) لا تستخدم المنتج إذا كانت العبوة التحتية في حال حدوث أي آثار جانبية نتيجة ارتداء العدسات اللاصقة، يجب على المستخدم إزالة العدسات فورًا واستشارة أخصائيي رعاية العيون قبل استئناف الاستخدام.
- 7) حتى يتم التأكد من (Aphakia) لا ينبغي تركيب العدسات اللاصقة للمرضى المصابين بانعدام العدسة الطبيعية لشفا العين بالكامل.
- 8) لا يمكن دائمًا استخدام المحاليل المختلفة معًا، كما أن ليست جميع المحاليل آمنة للاستخدام مع جميع أنواع العدسات.
- 9) استخدم فقط المحاليل الموصى بها للتعليمات فقط.
- 10) لا ينبغي استخدام محاليل التطهير الكيميائي مع الحرارة إلا إذا كان ذلك موضحًا تحديدًا على ملصق المنتج للاستخدام في كل من التطهير الحراري والكيميائي.
- 11) إذا التصقت العدسة (توقفت عن الحركة أو تعذر إزالتها)، يجب على المريض وضع 2 إلى 3 قطرات من محلول الترطيب أو إعادة الترطيب الموصى به مباشرة في العين والانتظار حتى تبدأ العدسة بالحركة بحرية قبل إزالتها. وإذا استمرت العدسة دون حركة لأكثر من 5 دقائق، يجب على المريض استشارة أخصائيي رعاية العيون فورًا.
- 12) اغسل واشطف يديك دائمًا قبل التعامل مع العدسات. تجنب وصول مستحضرات التجميل أو اللوشن أو الصابون أو الكريمات أو مزيجات العرق أو البخاخات إلى العينين أو العدسات. ومن الأفضل ارتداء العدسات قبل وضع المكياج. كما أن مستحضرات التجميل ذات الأساس المائي أقل احتمالًا لإتلاف العدسات مقارنة بالمنتجات الزيتية.
- 13) لا تلمس العدسات اللاصقة بالأصابع أو اليدين إذا لم تكن اليدين خاليتين من المواد الغريبة، إذ قد تحدث خدوش دقيقة على العدسات مما قد يسبب تشوش الرؤية وإصابة العين.
- 14) اتبع بعناية تعليمات التعامل مع العدسات وإدخالها وإزالتها وتنظيفها وتطهيرها وتخزينها وارتدائها الواردة في تعليمات المريض الخاصة بالعدسات اللاصقة، وكذلك التعليمات الموصوفة من قبل أخصائيي رعاية العيون.
- 15) لا ترتد العدسات أبدًا لفترة تتجاوز المدة الموصى بها من قبل أخصائيي رعاية العيون.
- 16) إذا تم استخدام منتجات الرذاذ مثل بخاخ الشعر أثناء ارتداء العدسات، فيجب توخي الحذر وإبقاء العينين مغلقين حتى يستقر الرذاذ.
- 17) تعامل دائمًا مع العدسات بعناية وتجنب إسقاطها.
- 18) استشر أخصائيي رعاية العيون بشأن ارتداء العدسات أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية.
- 19) أخبر الطبيب (أخصائي الرعاية الصحية) بأنك تستخدم العدسات اللاصقة.
- 20) لا تستخدم أبدًا الملقاط أو أي أدوات أخرى لإزالة العدسات من حاوية العدسات إلا إذا كان ذلك موضحًا خصيصًا لهذا الغرض. قم بسحب العدسة في اليد.
- 21) لا تلمس العدسة بالأظافر.
- 22) عند ارتداء عدسات تغير لون العين، قد يلاحظ المستخدم اختلافات مؤقتة في الرؤية بسبب وجود اللون في العدسة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة. وإذا استمرت هذه الاختلافات أثناء ارتداء العدسات، فمن المهم التواصل مع أخصائيي رعاية العيون.
- 23) لا تقم بتغيير نظام العناية بالعدسات اللاصقة دون استشارة أخصائيي رعاية العيون.
- 24) لا تشارك العدسات اللاصقة مع الآخرين.
- 25) قم بإزالة العدسات قبل الذهاب إلى النوم.
- 26) عندما تختلف وصفة النظر بين العينين، احرض على عدم تبديل العدسة اليمنى باليسرى.
- 27) استبدل العدسات إذا أصبحت غير مريحة، أو تسببت في تشوش الرؤية، أو ظهرت عليها علامات تلف مثل الخدوش أو التمزقات.
- 28) لا تتخلص من العدسات في المراوح أو المغسلة، بل قم برميها في سلة المهملات العادية.
- 29) يمكن للأطفال وكبار السن ارتداء العدسات اللاصقة بنجاح تحت إشراف أخصائيي رعاية العيون أو تحت إشراف الوالدين.

الأثار الجانبية

يجب إبلاغ المريض بأن المشكلات التالية قد تحدث:

- 1) وخز أو حرقان أو حكة (تهيج) في العينين، أو أي ألم آخر في العين.
- 2) انخفاض مستوى الراحة مقارنة عند وضع العدسة لأول مرة على العين.
- 3) الشعور بوجود شيء داخل العين مثل جسم غريب أو منطقة مخدوشة.
- 4) زيادة مفرطة في إفراز الدموع من العينين.
- 5) إفرازات غير طبيعية من العينين.
- 6) احمرار العينين.
- 7) انخفاض حدة الرؤية (ضعف في وضوح الإبصار).
- 8) تشوش الرؤية، أو رؤية ألوان قوس قزح، أو هالات حول الأجسام.
- 9) الحساسية للضوء (رهاب الضوء).
- 10) جفاف العينين.

تحذيرات

- 1) قد تقلل العدسات اللاصقة الملونة من وضوح الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- 2) إن ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم يزيد من خطر الإصابة بالعدوى وحدوث ضرر دائم في الرؤية.

موانع الاستعمال

- لا تستخدم العدسات اللاصقة عند وجود أي من الحالات التالية:
- 1) الالتهاب أو العدوى الحادة أو شبه الحادة في الجزء الأمامي من العين.
 - 2) أي مرض أو إصابة أو خلل في العين يؤثر على القرنية أو الملتحمة أو الجفون.
 - 3) نقص إفراز الدموع (جفاف العين).
 - 4) (Aphakia) نقص الإحساس بالقرنية، إذا لم يكن المريض مصابًا بانعدام العدسة الطبيعية.
 - 5) أي مرض جهازى قد يؤثر على العين أو قد يتفاقم بسبب ارتداء العدسات اللاصقة.
 - 6) تفاعلات حساسية في سطح العين أو ملحقاتها قد تنتج أو تتفاقم بسبب ارتداء العدسات اللاصقة أو استخدام محاليل العدسات.
 - 7) الحساسية تجاه أي مكون في المحلول المستخدم للعناية بالعدسات اللاصقة، مثل الزنق أو الثيمبروسال.
 - 8) أي عدوى نشطة في القرنية (بكتيرية أو فطرية أو فيروسية).
 - 9) إذا أصبحت العينان حمراوين أو متيجتين.
 - 10) إذا كان المريض غير قادر على اتباع نظام العناية بالعدسات أو غير قادر على الحصول على المساعدة اللازمة لذلك.

إدخال العدسة في العين

- 1) اشطف العدسات بمحلول متعدد الأغراض قبل ارتدائها.
- 2) ضع إحدى العدسات على طرف إصبع السبابة. تأكد من أن العدسة تأخذ شكل الوعاء وإذا لم تكن كذلك، قلب العدسة إلى الجهة الصحيحة.
- 3) أمسك الجفن العلوي من الأعلى بإصبع من اليد اليسرى.
- 4) ضع العدسة بعناية في منتصف القرنية مع إبقاء الجفن السفلي منخفضًا باستخدام الإصبع الأوسط من اليد اليمنى.
- 5) حرر الجفن العلوي ببطء، وانظر إلى الأسفل وأعلى عينك برفق.
- 6) كرر نفس الخطوات للعين الأخرى.

إزالة العدسة من العين

- 1) قد ترغب في استخدام قطرات الترطيب أو إعادة الترطيب قبل إزالة العدسات مباشرة.
- 2) تساعد قطرة أو قطرتان في كل عين على ترطيب العدسات وجعل إزالتها أسهل.
- 3) انظر إلى الأعلى مع إبقاء الجفن السفلي منخفضًا. اسحب العدسة برفق إلى الأسفل باستخدام إصبع السبابة والإبهام، ثم أمسك حافة العدسة واخذها من العين.
- 4) كرر نفس الخطوات للعين الأخرى.

التطهير

- 1) قبل إعادة إدخال العدسة بعد إزالتها من العين، اشطف العدسة دائمًا بمحلول العدسات اللاصقة الذي يوصى به أخصائيي رعاية العيون.
- 2) بعد ارتداء العدسات، قم بتخزينها في حاوية مملوءة بمحلول عدسات جديد وحافظ على نظافة الحاوية.
- 3) إذا كنت لا ترتدي العدسات بشكل متكرر، فقم بتغيير محلول العدسات الموجود في الحاوية بمحلول جديد مرة واحدة أسبوعيًا.
- 4) لإزالة البروتينات، قم بإجراء التنظيف أكثر من مرة أسبوعيًا باستخدام مزيج البروتين أو محلول ناعم مخصص يحتوي على وظيفة إزالة كاملة للبروتينات.

الغسل

- 1) ضع العدسة في راحة اليد.
- 2) أضف من 1 إلى 2 قطرة من محلول الغسل المخصص.
- 3) افرك جانبي العدسة بلطف بالتناوب.
- 4) اشطف العدسة جيدًا بالمحلول الملحي.

قائمة المنتجات الأخرى المخصصة للاستخدام مع الجهاز بالاشتراك مع

- محلول العدسات (منتج العناية بالعدسات اللاصقة)
محلول قائم على مادة بولي هكساميثيلين بيغوانيد -
1) اسم المنتج: Renew Fresh
2) الشركة المصنعة: Bausch & Lomb Incorporated
محلول قائم على بيروكسيد الهيدروجين -
1) اسم المنتج: Aosep + (hydrogen peroxide)
2) الشركة المصنعة: Alcon Research, Ltd.

الشركة المصنعة والممثل المعتمد في الاتحاد الأوروبي

DreamCon Co., Ltd.
#8, 10, Yeongdong 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea
Tel:+82(55)381-0300 Fax:+82(55)366-0211

AR Experts B.V.
209 Boeingavenue, 1119 PD Schiphol-Rijk, The Netherlands

معلومات الرموز

	الممثل المعتمد في الاتحاد الأوروبي
	الشركة المصنعة
	تاريخ التصنيع
	رقم الدفعة
	يرجى الرجوع إلى تعليمات الاستخدام
	جهاز طبي
	لا تستخدم إذا كانت العبوة تالفة، ويرجى الرجوع إلى تعليمات الاستخدام
	المعرف الفريد للجهاز
	يحفظ بعيدًا عن أشعة الشمس
	الانحناء القاعدي
	القطر الكلي
	القوة الكروية / القوة الخلفية للعدسة
	المستورد